


Hatano

洗浄シャワーボトル

Carèsil®

柔らかい素材のボトルで吐出量を調整しやすい

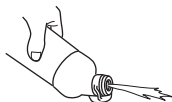

一目で中身の温度がわかる
示温シールを搭載

青 34℃以下
紫 36℃以上
ピンク 38℃以上



逆止弁内蔵でボトルが倒れてもこぼれにくい



シャワー洗浄とストレート洗浄の切り替えが可能





ストレート



シャワー

■各部の名称

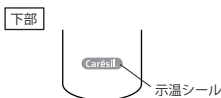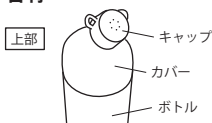

使用方法

1. カバーを外して、適温のお湯を入れてカバーをしっかり閉めます。



2. 用途に合わせて吐出パターンを選びます。

・キャップを開くとストレート ・キャップを閉じるとシャワー



※示温シールを見て温度の参考にしてください。

示温シールは消耗品です。反応が鈍くなったり、はがれやすくなった際は、新品と交換してください。
お買い求めはボトル購入先へお問い合わせください。

⚠ 警告

本体に高温のお湯を入れて使用しないでください。

示温シールは 38℃を超えると何度であってもそれ以上変化しません。

高すぎる温度は感知できないため、本体内の液温を確認してから使用してください。
やけどの原因となります。

⚠ 注意

用途以外での使用はしないでください。

煮沸消毒はしないでください。熱水消毒器・乾燥機は使用できません。

火のそばに置いたり、熱い湯を入れてご使用になると変形の恐れがあります。

直射日光に当たる場所に放置しないでください。シールが退色したり、ボトルの損傷の原因となります。

示温シールの温度表示は参考程度にご使用いただき、実際の温度はご自身で確認するようにしてください。

お湯などを入れたまま携帯される際は、ボトルに力が加わらないよう注意してください。
力が加わると弁が開放されお湯などが飛び出します。

＜材料＞	ボトル	LDPE
	カバー	ポリプロピレン
	キャップ	シリコーンゴム
＜耐熱温度＞	80℃	
＜容量＞	450mL(最大目盛り容量：400mL)	

〒594-1157
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7-5
TEL:0725-50-5150

株式会社ハタノ製作所



ケアシル L (40°曲がり)
示温シールあり
OSB-1L

T-AA-160-B