


# Hatano

## 洗浄シャワーボトル


# Carësil®

柔らかい素材のボトルで吐出量を調整しやすい

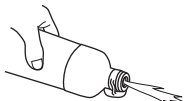

一目で中身の温度がわかる  
示温シールを搭載

**青** 34℃以下  
**紫** 36℃以上  
**ピンク** 38℃以上

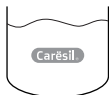

逆止弁内蔵でボトルが倒れてもこぼれにくい



シャワー洗浄とストレート洗浄の切り替えが可能




ストレート



シャワー

### ■各部の名称

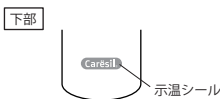

### 使用方法

1. カバーを外して、適温のお湯を入れてカバーをしっかり閉めます。



2. 用途に合わせて吐出パターンを選びます。

・キャップを開くとストレート      ・キャップを閉じるとシャワー



※示温シールを見て温度の参考にしてください。

示温シールは消耗品です。反応が鈍くなったり、はがれやすくなった際は、新品と交換してください。  
お買い求めはボトル購入先へお問い合わせください。

### ⚠ 警告

本体に高温のお湯を入れて使用しないでください。

示温シールは 38℃を超えると何度であってもそれ以上変化しません。

高すぎる温度は感知できないため、本体内の液温を確認してから使用してください。  
やけどの原因となります。

### ⚠ 注意

用途以外での使用はしないでください。

煮沸消毒はしないでください。熱水消毒器・乾燥機は使用できません。

火のそばに置いたり、熱い湯を入れてご使用になると変形の恐れがあります。

直射日光に当たる場所に放置しないでください。シールが退色したり、ボトルの損傷の原因となります。

示温シールの温度表示は参考程度にご使用いただき、実際の温度はご自身で確認するようにしてください。

お湯などを入れたまま携帯される際は、ボトルに力加わらないよう注意してください。  
力加わると弁が開放されお湯などが飛び出します。

|        |                      |         |
|--------|----------------------|---------|
| ＜材料＞   | ボトル                  | LDPE    |
|        | カバー                  | ポリプロピレン |
|        | キャップ                 | シリコンゴム  |
| ＜耐熱温度＞ | 80℃                  |         |
| ＜容量＞   | 450mL(最大目盛り容量：400mL) |         |



〒594-1157  
大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 7-5  
TEL:0725-50-5150

株式会社ハタノ製作所



ケアシル S (ストレート)  
示温シールあり  
OSB-1S

T-AA-161-B