

# Hatano


## 洗浄シャワーボトル

# Carësil®

柔らかい素材のボトルで吐出量を調整しやすい



逆止弁付きで必要な量だけ吐出

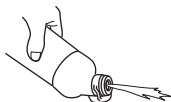

逆止弁内蔵でボトルが倒れてもこぼれにくい



シャワー洗浄とストレート洗浄の切り替えが可能




ストレート



シャワー

### ■ 各部の名称

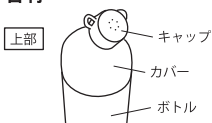

### 使用方法

1. カバーを外して、適温のお湯を入れてカバーをしっかり閉めます。



2. 用途に合わせて吐出パターンを選びます。

- ・キャップを開くとストレート
- ・キャップを閉じるとシャワー



### ⚠ 警告

本体に高温のお湯を入れて使用しないでください。

### ⚠ 注意

用途以外での使用はしないでください。  
煮沸消毒はしないでください。熱水消毒器・乾燥機は使用できません。  
火のそばに置いたり、熱い湯を入れてご使用になると変形の恐れがあります。  
直射日光に当たる場所に放置しないでください。シールが退色したり、ボトルの損傷の原因となります。  
お湯などを入れたまま携帯される際は、ボトルに力が加わらないよう注意してください。  
力が加わると弁が開放されお湯などが飛び出します。

<材料>	ボトル	LDPE
	カバー	ポリプロピレン
	キャップ	シリコーンゴム
<耐熱温度>	75℃	
<容量>	450mL(最大目盛り容量: 400mL)	

JAN

〒594-1157  
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7-5  
TEL:0725-50-5150

株式会社ハタノ製作所



ケアシルボトルLN  
(40°曲がりシールなし)  
OSB-1LN

T-AA-162-A