


Hatano

洗浄シャワーボトル


Carèsil®

柔らかい素材のボトルで吐出量を調整しやすい

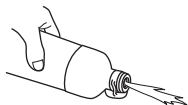

一目で中身の温度がわかる
示温シールを搭載


青 34℃以下
紫 36℃以上
ピンク 38℃以上

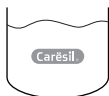


逆止弁内蔵でボトルが倒れてもこぼれにくい



シャワー洗浄とストレート洗浄の切り替えが可能

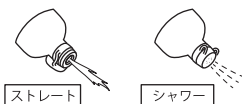

■各部の名称

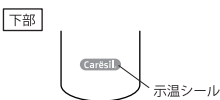


使用方法

1. カバーを外して、適温のお湯を入れてカバーをしっかり閉めます。



2. 用途に合わせて吐出パターンを選びます。

・キャップを開くとストレート ・キャップを閉じるとシャワー

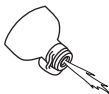

※示温シールを見て温度の参考にしてください。

示温シールは消耗品です。反応が鈍くなったり、はがれやすくなった際は、新品と交換してください。お買い求めはボトル購入先へお問い合わせください。

⚠警告

本体に高温のお湯を入れて使用しないでください。
示温シールは 38℃を超えると何度であってもそれ以上変化しません。
高すぎる温度は感知できないため、本体内の液温を確認してから使用してください。
やけどの原因となります。

⚠注意

用途以外での使用はしないでください。
煮沸消毒はしないでください。熱水消毒器・乾燥機は使用できません。
火のそばに置いたり、熱い湯を入れてご使用になると変形の恐れがあります。
直射日光に当たる場所に放置しないでください。シールが退色したり、ボトルの損傷の原因となります。
示温シールの温度表示は参考程度にご使用いただき、実際の温度はご自身で確認するようにしてください。
お湯などを入れたまま携帯される際は、ボトルに力が加わらないよう注意してください。
力が加わると弁が開放されお湯などが飛び出します。

<材料> ボトル LDPE
 カバー ポリプロピレン
 キャップ シリコーンゴム
<耐熱温度> 75℃
<容量> 450mL(最大目盛り容量：400mL)

JAN

〒594-1157
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7-5
TEL:0725-50-5150

株式会社ハタノ製作所



ケアシル S (ストレート)
OSB-1S

T-AA-161-A