
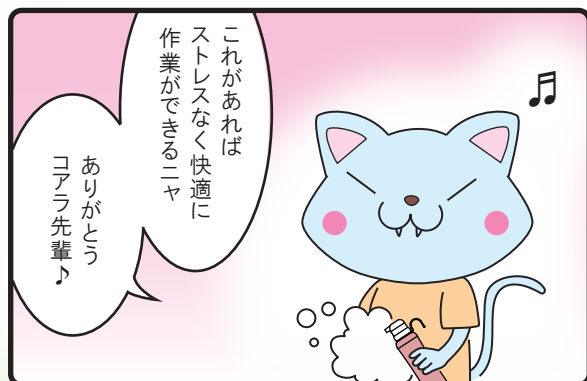





手元で完結する清潔ケア

介護現場のあるある解決！

あるある①「倒してしまった時」

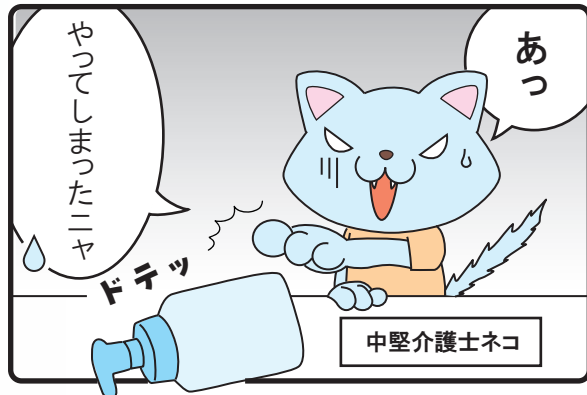

あるある②「置き場所がない時」

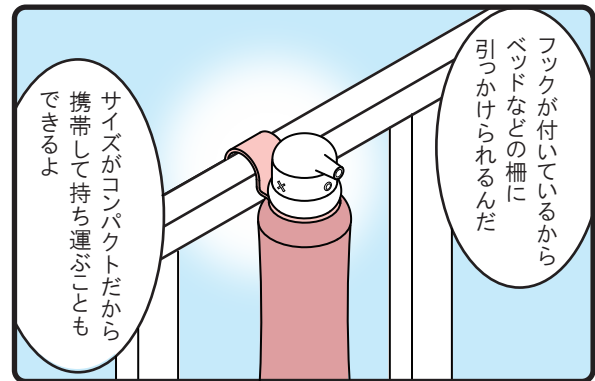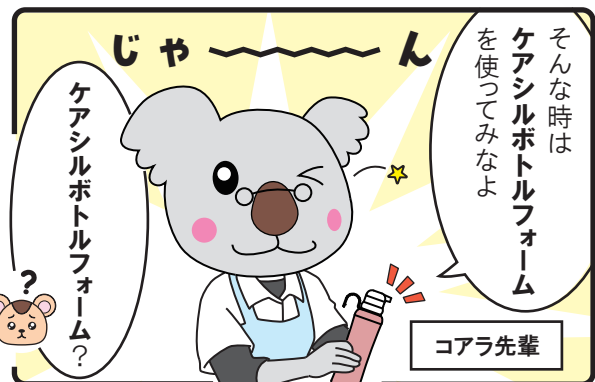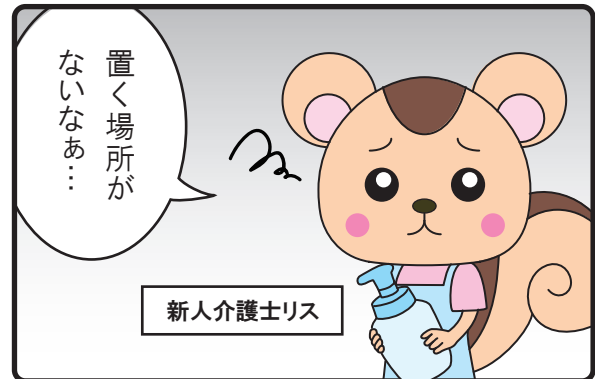

ケアシルボトルフォームはこんな介護あるあるを解決します！

✓ ボトルの中身がみえないから残量がわからない…

ボトルが半透明で洗浄剤の量が一目瞭然

✓ 片手でボトルを握るのに結構な力が必要…

柔らかく握りやすいボトルで作業負担を軽減

✓ 市販の据置ボトルは置き場所を選ぶから作業効率が悪い…

片手で押して泡を出せるから作業を中断せず使える



■ 使い方

泡タイプ専用ボトルです。必ず泡タイプの洗浄剤をご使用ください。

1 

ポンプとフックを外します。

2 

目印ラインのところまで洗浄剤を入れます。

3 

フックを取り付け、ポンプをしっかりと閉めます。

4 

ノズルをO印合わせて、ご使用ください。

ケアシルボトルフォーム

単価：¥1,188（税込）

品番	容量	耐熱温度	材質	入数
OSB-FM	230mL	70℃	ボトル：LDPE ポンプ：PP,LLDPE フック：PP	10個

Made in Japan



〒594-1157
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7-5
TEL: 0725-50-5150

詳しくは Web へ

Hatano
株式会社ハタノ製作所

